

# Wund-Schnellverband & Wund-Pad-Schnellverband

- ▶ Latexfrei
- ▶ Praktische Smartbox

## Merkmale

- ▶ Verklebt nicht auf der Wunde
- ▶ Atmungsaktiv
- ▶ Wasser- und ölresistent
- ▶ Dauerelastisch
- ▶ Latexfrei, dadurch antiallergen
- ▶ Rückstandslos ablösbar

## Verarbeitungsvorteile

- ▶ Gelenke bleiben frei bewegbar
- ▶ Pflaster, Gelenkverband, Finger- und Fingerkuppenverband in einem
- ▶ Produkt haftet nur auf sich selbst
- ▶ Kein Zuschneiden notwendig, da von Hand abreißbar

## Anwendungsbereiche

- ▶ Alltagsverletzungen
- ▶ Kleinere Schnittwunden
- ▶ Hautabschürfungen
- ▶ Schutz vor äußeren Reizeinflüssen auf die Haut

Mit Wund-Pad



# Wund-Schnellverband & Wund-Pad-Schnellverband

## Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Haushalt
- ▶ Kindergarten
- ▶ Sport
- ▶ Freizeit
- ▶ Haustierbesitzer

## Hinweise

- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Packungsbeilage beachten!

## Verarbeitung

Die Wunde von eventuellen Verschmutzungen säubern. Den **CareLine Wund-Schnellverband** je nach Art der Verletzung (Gelenk- oder Kuppenverletzung) gemäß der beiliegenden Anleitung anlegen. Nach dem Umwickeln ist das Band einfach abzureißen und auf dem Verband fest anzudrücken.

Den **CareLine Wund-Pad-Schnellverband** aus der Verpackung entnehmen und ein Wundkissen je Größe und Blutung der Wunde falten. Das Wundkissen auf die Wunde legen und den Verband mit mittelmäßigem Zug auf beiden Seiten des Wundkissens herumwickeln. Den Verband zum Wundkissen zurückführen. Einfach abreißen und das Ende fest andrücken.

## Zubehör

	Art.-Nr.
Hand- und Flächendesinfektion 75 ml	290 1 100
Arbeitsschutzhandschuh -cut-	905 020 2xx



## Technische Daten

<b>Basis</b>	Textilverbundstoff		
<b>Wasserfest</b>	Es dringt kein Blut durch, und die Wunde wird nicht nass. Ganz normales Händewaschen und Arbeiten mit nassen Händen ist problemlos möglich.		
<b>Elastisch</b>	Stoppt starke Blutungen als Komresse. Löst sich nicht, wenn das Gelenk bewegt wird, stört nicht beim Arbeiten.		
<b>Klebstofffrei</b>	Klebt nicht an der Wunde oder an Haaren, sondern nur an sich selbst. Keine Kleberreste an den Fingern. Bei Kindern ist der Verband sehr beliebt, da er sich jederzeit absolut schmerzfrei durch Abrollen entfernen lässt.		
<b>Farbe</b>	beige/blau		
<b>Lagerung</b>	nicht über +25° C, trocken		
<b>Inhalt/Verpackung</b>	<b>Wund-Schnellverband</b> 2 Rollen 25 mm à 6,5 m (in Smartbox)	12 Stück/Karton	Art.-Nr. 290 8 002
	<b>Wund-Pad-Schnellverband</b> 2 Rollen 25 mm à 4,5 m (in Smartbox)	12 Stück/Karton	Art.-Nr. 290 8 016

